

レントゲン 撮影フロー



①

イメージングプレートは、
専用のIP保管用ボックスにて
保管して下さい。

②

ハイジーンバッグ（プロテクタカバー付き）に
イメージングプレートを入れます。



③

ハイジーンバッグの封をします。



④

イメージングプレートを口腔内に設定し、
レントゲンを撮影します。



※ イメージングプレートの向きに注意して下さい。


⑤

レントゲンソフトウェアから
スキャンの指示を行います。



⑥

ハイジーンバッグに付着した唾液を拭き取り、
イメージングプレートを取り出します。
この時、プロテクタカバーで挟んだままにし、
イメージングプレートに直接触れないようにします。

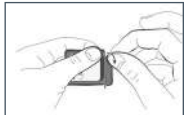

⑦

プロテクタカバーで挟んだまま、イメージングプレートを
挿入口にセットします。



⑧

イメージングプレートが
取り込まれ、
スキャンが始まります。



⑨

スキャンが完了すると、
液晶画面に画像が表示され、
データがソフトウェアに転送されます。
（イメージングプレートは中のデータが
消去された状態で排出されます。）



仕 様

論理解像度	20lp/mm
スキャン時間（ファストモード）	1.6秒～2.7秒
スキャン時間（高解像度モード）	2.1秒～3.6秒
接続端子	イーサネット（RJ-45）
本体寸法	幅154mm×奥行204mm×高さ193mm
重量	2.6kg
電源電圧	100-240VAC、50/60Hz



● セット内容



イメージングプレート

サイズ0 …… 2枚
サイズ2 …… 2枚



ハイジーンバッグ・プロテクタカバーセット

ハイジーンバッグ サイズ0, 2 …… 各100枚
プロテクタカバー サイズ0, 2 …… 各100枚



IP保管用ボックス

IPを使用されない時はこのボックス内に
保管することで常にノイズの無い画像に保
つことが出来ます。
サイズ2のイメージングプレートが約20枚
収納可能です。

● イメージングプレート

サイズ0	22×35mm
サイズ1	24×40mm
サイズ2	31×41mm
サイズ3	27×54mm
サイズ4（サイズ3×3）	69×54mm

● 補充品



イメージングプレート

サイズ0, 1, 2, 3
各1枚入



ハイジーンバッグ（プロテクタカバー付）

サイズ0, 1, 2, 3
各300枚入



ハイジーンバッグ

サイズ0, 1, 2, 3
各250枚入
サイズ4
100枚入

● 使用環境（推奨）

OS — Windows 7 Pro SP1、8、8.1、10
CPU — Intel Core i シリーズ
メモリ — 2GB以上
HDD — 500GB以上
ビデオボード — 512MB RAM (Nvidia or ATI) 以上
画面解像度 — 1280×1024以上
イーサネットボード — 1GB/秒以上

※ 事業名：PSピックス2 一般的名称：コンピューテッドラジオグラフ
※ 認定番号：227ALBZX00009000 管理医療機器 特定保守管理医療機器

※ イメージングプレート（PSピックス2用）
※ 届出番号：27B1X00020227001 一般医療機器



アクテオングループ（ソプロ社）
フランス

白水貿易株式会社

〒064-0824 札幌市中央区北4条西20丁目2番1号 Nord 420BLD1F ☎(011)616-5814
〒101-0052 東京都千代田区神田小川町1-11 千代田小川町クロス12F ☎(03)5217-4618
〒464-0075 名古屋市中千代田区山3-10-17 今池セントラルビル2F ☎(052)733-1877
〒532-0033 大阪市淀川区新高1丁目1番15号 ☎(06)6396-4400
〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-18-30 八重洲博多ビル5F ☎(092)432-4618

2022.1 P.1,500 A24 Ver.1.3.1

PSPiX²

HAKUSUI

PSピックス²

コンピューテッドラジオグラフ

AMAZING
SIZE

省スペース

SO
SIMPLE


シンプル操作

HIGH-
SPEED
SCAN

高速スキャン



省スペース
シンプル操作
高速スキャン

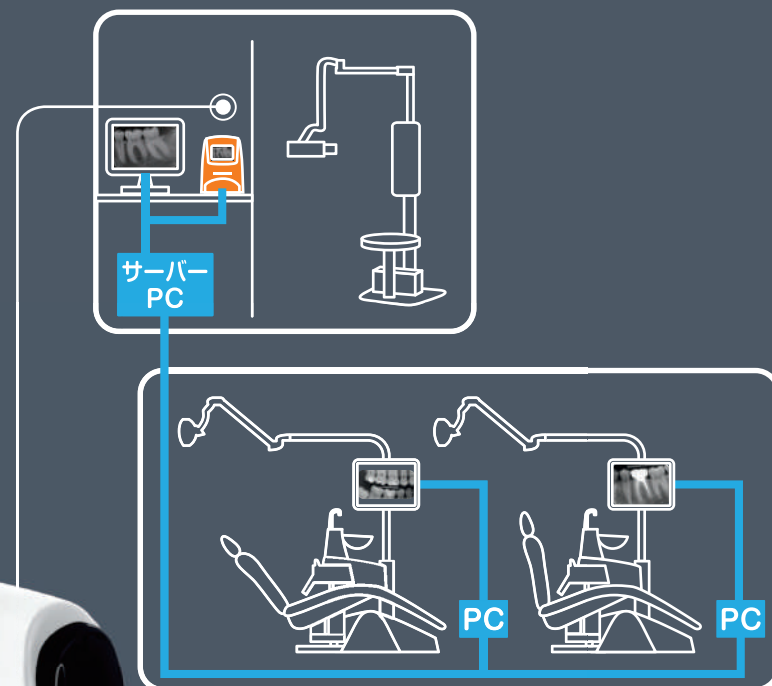

快適で経済的
確かな高画質

👉 現像液・定着液から
解放されます！

衛生的な
システム設計

● ハイジーンバッグとプロテクタカバーの
2重プロテクションにより交差感染を予防



防水タイプのハイジーン
バッグにより感染を防止
し、プロテクタカバーが
IPを保護します。



さらにプロテクタカバー
でIPをサンドイッチする
ことで直接触れる必要が
ありません。



2重プロテクションされた
IPのみがスキャナ内部に挿
入されるため、スキャナ本
体は常に衛生的に保たれま
す。

ほこり等が入らない開閉シャッター
スタンバイ状態の時のみ挿入口がオープンします。

標準カバー  ジェット
ウォッシャー可

マグネット式
かんたん脱着

防水タイプのハイジーンバッグにより
感染を防止し、プロテクタカバーが
イメージングプレートを保護します。

マグネット式
かんたん脱着

標準トレイ  ジェット
ウォッシャー可

安心のシンプル操作

● 自動スタート

イメージングプレートが挿入された時のみ、
本体の挿入口がオープンします。
使用していない時は挿入口が閉じているので、
ゴミ・埃等の侵入を予防します。

● 自動認識

イメージングプレートのサイズは、得られた
画像から自動で認識します。

● 自動調整


得られた画像を自動で最適化します。

● 自動消去


スキャンを行ったイメージングプレートは、
中のデータを消去された状態で排出されます。




サイズ 0
22×35mm

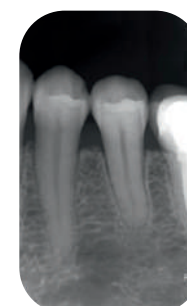


サイズ 1
24×40mm

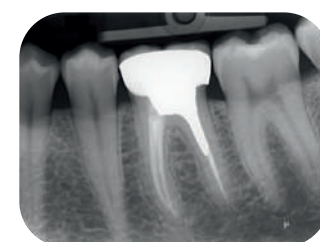

サイズ 2
31×41mm

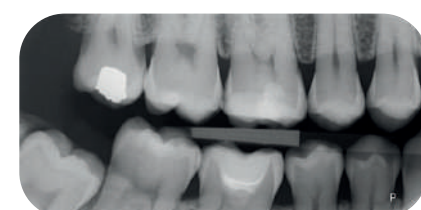

サイズ 3
27×54mm

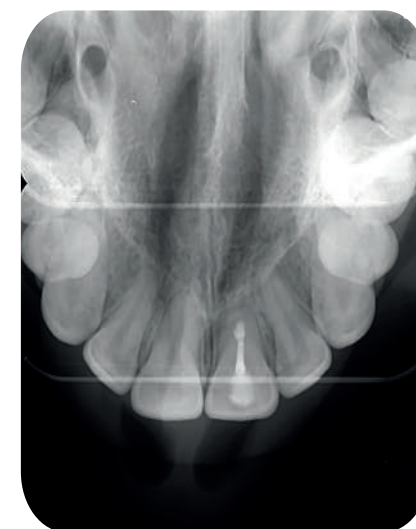

サイズ 4
69×54mm

サイズ4は専用のテンプレートと
サイズ3のイメージングプレート
を3枚使用し、ソフトウェア上で
作成します。



イメージングプレートは非常にフレキシブル。
フィルムと同じように曲げられますので、
快適に使用できます。

スキャンタイム

約 3秒

スキャン開始から画像表示まで

約 12秒

ストレスフリーの高速スキャン
(サイズ2使用時)

実物大

